


GESICHTSVISIER mehrfach verwendbar


Sie können Ihr Gesichtsvisier mehrfach verwenden indem Sie es mit Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis reinigen. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie dabei weiche Tücher. Um Verformung des Materials zu vermeiden, verwenden Sie kein Wasser über 50 Grad C.




Bevor Sie alle Teile zusammenbauen, waschen Sie gründlich Ihre Hände und desinfizieren Sie alle Teile.

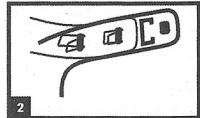

Befestigen Sie das Stirrband oben am Visier.

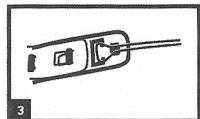

Den roten Gummiring stecken Sie in die oberen länglichen Öffnungen.

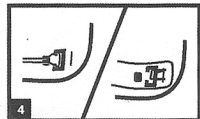

Den blauen Gummiring stecken Sie in die unteren länglichen Öffnungen und befestigen Sie den kürzeren Verstärkungsband unten am Visier.

